

**Fordern Sie kostenlos
unseren Baby-Katalog an!**



Der Baby-Frank Inhalationssauger hilft der kleinen Schnupfennase!

Während Ihr Baby am Sauger nuckelt, kann es die ätherischen Öle inhalieren und bekommt dadurch wieder freie Atemwege.

Die kieferorthopädische Form fördert die natürliche Kiefer- und Gaumementwicklung, die Kirschform ist der Brustwarze nachempfunden.

Erhältlich in den Ausführungen:



1 Kieferorthopäd. Größe, 0-6 M. **2** Kieferorthopäd. Größe, 6-18 M. **1** Kirsche, klein Größe, 0-6 M. **2** Kirsche, groß Größe, 6-18 M.

Erhältlich in den Farben blau, himbeer, petrol, gelb, weiß

Fragen Sie Ihren Apotheker.

Anwendung Inhalationssauger:


- a. Deckel mit Inhalationslöchern
- b. Kammer für Watte
- c. Mundschild
- d. Scharnier

1. Baby-Frank-Inhalationssauger am Mundschild festhalten und mit dem Daumen gelochte Kugelhälfte nach oben hin öffnen.

2. Watte in die untere Kugelhälfte einlegen.

3. Ein bis zwei Tropfen des kinderverträglichen **Baby-Frank-Inhalationsöls** auf den Wattebausch träufeln.

4. Deckel sicher, hörbar einrastend, verschließen.

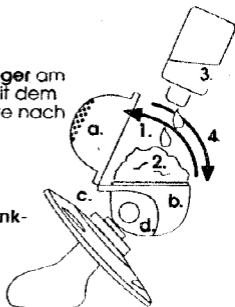

Sicherheitshinweise:

Prüfen Sie vor jeder Anwendung die Zugfestigkeit des Saugerteils! Tauschen Sie den Sauger bitte aus, falls erkennbare Gebrauchsspuren (kleine Risse u.ä.) auftreten

Reinigungshinweise:

Vor dem ersten Benutzen bitte den Sauger ca. 3-4 Minuten auskochen (nicht in der Mikrowelle!). Achten Sie bitte darauf, daß im Topf ausreichend Flüssigkeit ist.

GARANTIE FÜR QUALITÄT!



Büttner-Frank GmbH • Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen
Tel. 09131 / 7905-0 • Fax 09131 / 60 27 69
e-mail: kundenservice@bueftner-frank.de